

signia

Жизнь звучит ярко!

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Наследие
и опыт

SIEMENS

Уважаемые партнеры Немецкого Слухового Центра!

Перед вами очередной каталог продукции слуховых аппаратов марки Signia. Он поможет вам разобраться в большом ассортименте слуховой продукции, и подобрать индивидуальное решение для каждого клиента, приходящего в ваш слуховой центр.

Желаем вам успехов в работе и процветания!

Все ваши пожелания и замечания можете высылать на электронный адрес:

euroluxsystema@mail.ru



Оглавление

1. Приветствие.....	2
2. Оглавление.....	3
3. Миссия Sivantos.....	4
4. Обзорная таблица.....	4
5. Обзор функций Signia NX.....	5
6. Приложение на смартфоне: Signia.....	6
7. Новые уровни производительности.....	7
8. Signia Styletto Connect.....	8
9. Signia Styletto.....	9
10. Pure Charge&Go Nx	10
11. Pure 312 Nx.....	11
12. Pure 13 Nx.....	12
13. Pure 10 Nx.....	13
14. Motion Charge&Go Nx.....	14
15. Motion 13 Nx.....	15
16. Silk Nx.....	16
17. Insio Nx.....	17
18. Intuis 3 RIC 312.....	18
19. Intuis 3 заушный.....	19
20. Intuis 3 внутриушные.....	20
21. Обзор функций Intuis 3.....	21
22. Prompt.....	22
23. Run.....	23
24. Приложения и совместимость аппаратов.....	24
25. Аксессуары.....	25
26. Официальный представитель в Казахстане.....	26

Мы, немецкая компания **Sivantos** с маркой **Signia** создаем сегодня будущее звучание слуховых аппаратов! Еще когда мы выпускались под маркой «Слуховые аппараты Siemens» это было нашей миссией, которую мы последовательно реализуем уже на протяжении 140 лет.

Мы - первопроходцы в сфере производства слуховых аппаратов, мы представили бесчисленные мировые изобретения в этой сфере и мы дальше продолжаем писать историю своего успеха, выводя в мир сегодня новые аппараты уникального дизайна и функциональности, перезаряжаемые аппараты марки **STYLETTO** вместе с новой линейкой аппаратов **Charge & Go** в Pure и Motion.

Сегодня мы можем предложить своим пользователям самый широкий диапазон моделей аппаратов, которые будут удовлетворять любые потребности и подойдут при любой стадии тугоухости.

Это классические заушные аппараты, аппараты по типу RIC – ресивер в канале, быстроподбираемые внутриушные по типу CLICK, и широкий ряд внутриушных аппаратов от внутриканальных до невидимых.

Тугоухость	Ресивер в канале					
	глубокая	тяжелая	умеренная	легкая		
глубокая						
тяжелая					Pure 312 Nx <small>Новинка!</small>	Pure 13 Nx <small>Новинка!</small>
умеренная	Styletto Connect	Styletto	Pure 10 Nx <small>Новинка!</small>			Pure Charge&Go Nx
легкая						
Тугоухость	Заушные					
	глубокая	тяжелая	умеренная	легкая		
глубокая						
тяжелая	Motion 13 Nx <small>Новинка!</small>	Motion 13P Nx <small>Новинка!</small>	Motion Charge&Go Nx		Motion primax	Intuis 3
умеренная						Prompt
легкая						
Тугоухость	Внутриушные					
	глубокая	тяжелая	умеренная	легкая		
глубокая						
тяжелая			Insio Nx <small>Новинка!</small>		Insio primax	Intuis 3
умеренная	Silk Nx <small>Новинка!</small>			Silk primax		
легкая						

Обзор функций

Signia Nx

Наша инновационная платформа Signia Nx помогает наиболее правильно передавать голос пользователя и речь даже в условиях шума – и все это в сочетании со сверхсовременными системами Bluetooth соединения

Функции	Информация	Уровни производительности				
		7Nx	5N3Nx	2Nx	1Nx	
Аудиология						
OVP™ (Обработка голосовых данных пользователя)	Функция Own Voice Processing (OVP™) создает естественное восприятие собственного голоса. Доступно с Ultra HD e2e	●●●●●	●●●●●	●●●●●	-	-
Классификатор 3D	Классификатор 3D анализирует многомерную информацию о голосовой активности пользователя, состоянии его движения и акустические данные для корректировки отклика слухового аппарата с учетом потребностей его пользователя	●●●●●	●●●●●	●●●	-	-
Sound Clarity (Четкость звука)	Благодаря функции Sound Clarity обеспечивается непревзойденная четкость звука	●●●●●	●●●●●	●●●	●●	●●
Speech Quality (Качество речи)	Благодаря эксклюзивной технологии Ultra HD e2e, функция Speech Quality помогает улучшить понимание голосов других людей в условиях шума	●●●●●	●●●●●	●●●	●●	●●
Возможности соединения						
Прямая потоковая передача звука	Слуховые аппараты Signia Nx можно подключать напрямую к устройствам Apple для телефонных звонков и потоковой передачи звука. Для устройств на базе Android потоковую передачу звука упрощает аксессуар StreamLine Mic. Доступно для устройств с поддержкой Bluetooth.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Пользовательские настройки через мобильные приложения	Пользователи, предпочитающие технологии, по достоинству оценят наличие дополнительного контроля над своими слуховыми аппаратами с помощью приложения Signia	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

●●●●● = самый высокий уровень производительности функции

Приложение на смартфоне: **SIGNIA APP**

Упрощенное, удобное для всех, новое приложение Signia на смартфоне объединяет все существующие приложения Signia в единую среду, которая отвечает всем нуждам пользователя.

Может использоваться со всеми слуховыми аппаратами Signia, его интеллектуальный пользовательский интерфейс отображает функции конкретного пользователя, применимые к его собственному устройству.




Приложение совместимо с устройствами на базах Android и iOS. Загрузка с Apple App Store и Google Play Store бесплатна.



Общий обзор функций


TeleCare

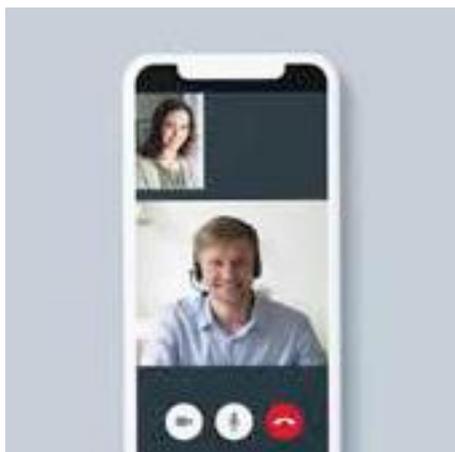

Оставайтесь в тесном контакте с вашими клиентами:

- Контакт в режиме реального времени посредством текстового сообщения, голосового звонка или видеозвонка

SIGNIA APP

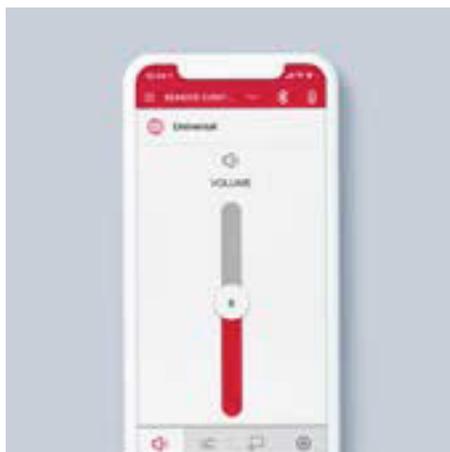

- Программы настройки
- Регулятор громкости
- Настройка баланса звука
- 360 ° конфигуратор пространства для индивидуальной настройки направленности
- Непрерывный мониторинг подключения слухового аппарата и состояния аккумулятора

SIGNIA APP



- Простое управление аксессуарами для потоковой передачи звука типа StreamLine TV, StreamLine Mic), а также устройствами с CROS (контралатеральная маршрутизация сигналов)
- Контроль уровня громкости во время потоковой передачи

Новые уровни производительности, позволяющие усовершенствовать обработку звуковой среды, теперь в 1, 2, 3, 5, 7 серии

Чип обработки звука Signia Nx стал еще меньше, обеспечивая еще более высокую производительность при еще меньших размерах аппаратов.

Передовая технология Signia Nx создает расширенные возможности прямого подключения через Ultra HD e2e и Bluetooth к другим устройствам, поддерживающим Bluetooth

Каналы компрессии звука

7Nx	48 каналов
5Nx	32 канала
3Nx	24 канала
2Nx	16 каналов
1Nx	16 каналов



Pure 312 Nx

Pure 13 Nx

Pure 10 Nx



RIC

BTE

Motion 13 Nx

Motion 13P Nx

ITE



Silk Nx

Уникальный и стильный дизайн с переносным аккумулятором и Bluetooth



Каналы компрессии звука

- 7 48 каналов
- 5 32 канала
- 3 24 канала

Signia Styletto Connect

Новый аппарат Styletto Connect сочетает в себе все лучшие аудиологические характеристики и передовой уникальный дизайн.

Это модный слуховой аппарат, созданный на базе революционной платформы Nx, имеет в себе перезаряжаемый литий-ионный элемент питания с системой подключения Bluetooth для потоковой передачи данных и подзарядки через переносной аккумулятор

Ключевые функции



Доступно приложение Signia.



Поддержка Bluetooth.



StreamLine TV
Благодаря функции StreamLine TV сигнал передается непосредственно в аппарат



StreamLine Mic
Обеспечивает потоковую передачу звуков с любого устройства с поддержкой Bluetooth.



Пользователи аппарата имеют возможность носить устройство в течение всего дня и заряжать его в движении благодаря ультратонкому переносному футляру - аккумулятору

Тонкий RIC

Модель

Тип ресивера

miniReceiver 2.0



Производительность

Матрица (2 ccm)

60/119 дБ

Аккумулятор

Тип

Литий-ионный элемент питания

Потребляемая мощность

1,4 мА

Наслаждаясь жизнью с передовыми технологиями



Каналы компрессии звука

7	48 каналов
5	32 канала
3	24 канала
2	16 каналов
1	16 каналов



Ключевые функции

- В стильной конструкции
- Исключительное распознавание речи в условиях шума



Доступно приложение Signia.

- TeleCare
- Удаленное управление



Возможность перезарядки.

Пользователи аппарата имеют возможность носить устройство в течение всего дня и заряжать его в движении благодаря ультратонкому переносному футляру - аккумулятору

Signia Styletto

Это революционная модель Styletto от Signia предложившая стильный дизайн. Сегодня доступна во всех уровнях производительности и включает в себя последние достижения в области энергоэффективных конструкций чипов, уникальный литий-ионный элемент питания и естественное звучание.

И все это – в изысканном дизайне, аппарате очень малой толщины.

SLIM-RIC

Модель

Тип ресивера

miniReceiver 2.0



Производительность

Матрица (2 ссм)

60/119 дБ

Аккумулятор

Тип

Литий-ионный

Потребляемая мощность

1,4 мА

Удобная беспроводная перезарядка и поддержка Bluetooth



Ключевые функции



Доступно приложение Signia.



Возможность перезарядки.



Поддержка Bluetooth.



StreamLine TV



StreamLine Mic

Каналы компрессии звука

7Nx	48 каналов
5Nx	32 канала
3Nx	24 канала
2Nx	16 каналов
1Nx	16 каналов

Pure Charge&Go Nx

Теперь просто заряжайте аппарат и идите с ним! Функция удобной перезарядки литий-ионного аккумулятора, предлагается даже в 1 и 2 серии, также в 3,5,7 серии

Имеет функцию прямой передачи Bluetooth, также через **StreamLine Mic** обеспечивает потоковую передачу звуков без использования рук (телефонные звонки, музыка и т.д.) с любого устройства с поддержкой Bluetooth. Благодаря функции **StreamLine TV** потоковый ТВ-сигнал передается непосредственно в аппарат

Модель

Тип ресивера

miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP

Производительность

Матрица (2 ссм)

45/108 дБ	60/119 дБ	70/124 дБ	75/130 дБ
Литий-ионный элемент	Литий-ионный элемент	Литий-ионный элемент	Литий-ионный элемент
1,2 мА	1,4 мА	1,3 мА	1,3 мА

Аккумулятор

Тип

Потребляемая мощность

Полнофункциональный аппарат RIC с прямой потоковой передачей звука на 312 бат



Каналы компрессии звука

7Nx	48 каналов
5Nx	32 канала
3Nx	24 канала
2Nx	16 каналов
1Nx	16 каналов

Pure 312 Nx

Обладающий всеми преимуществами платформы Signia Nx, слуховой аппарат Pure 312 Nx сочетает в своем небольшом элегантном корпусе наиболее естественное звучание собственного голоса пользователя и идеальное распознавание речи. Аппарат Pure 312 Nx гарантирует превосходную связь благодаря прямой потоковой передаче звука через Bluetooth и приложение Signia

Ключевые функции

- Передача наиболее естественного звучания голоса пользователя и идеальное понимание речи в условиях шума благодаря чипу Nx
- Небольшая, неброская конструкция
- Ultra HD e2e и подключение через Bluetooth



Доступно приложение Signia.

- TeleCare
- Удаленное управление
- Возможности соединения и потоковая передача



Совместим с устройствами CROS для людей с односторонней невосстановимой тугоухостью.



StreamLine TV
Благодаря функции StreamLine TV потоковый ТВ-сигнал передается непосредственно в слуховые аппараты Pure 312Nx.



StreamLine Mic
Функция StreamLine Mic обеспечивает потоковую передачу звуков без использования рук с любого устройства с поддержкой Bluetooth.

Модель

Тип ресивера

miniReceiver 2.0 S

miniReceiver 2.0 M

miniReceiver 2.0 P

miniReceiver 2.0 HP



Производительность

Матрица (2 сст)

45/108 дБ

60/119 дБ

70/124 дБ

75/130 дБ

Аккумулятор

Размер

312

312

312

312

Потребляемая мощность

1.2 мА

1.4 мА

1.3 мА

1.3 мА

Сверхнадежное соединение с самым длительным временем поточковой передачи звука



Доступно приложение Signia.

- TeleCare
- Удаленное управление
- Возможности соединения и потоковая передача



Совместим с устройствами CROS для людей с односторонней тугоухостью.



StreamLine TV
Благодаря функции StreamLine TV потоковый ТВ-сигнал передается непосредственно в аппараты Pure 13 Nx.



StreamLine Mic
Функция StreamLine Mic обеспечивает потоковую передачу звуков без использования рук с любого устройства с поддержкой Bluetooth.

Каналы компрессии звука

7Nx	48 каналов
5Nx	32 канала
3Nx	24 канала
2Nx	16 каналов
1Nx	16 каналов

Pure 13 Nx

Благодаря отдельной обработке собственного голоса пользователя и его плавной интеграции в звуковую среду слуховой аппарат Pure 13 Nx от Signia обеспечивает наиболее естественное звучание голоса пользователя и наиболее оптимальное распознавание речи в условиях шума. За счет Bluetooth он предлагает превосходную связь посредством прямой потоковой передачи звука. Пользователям предлагается наиболее продолжительное время использования аппарата за счет увеличенной батарейки типа 13

Модель

Тип ресивера

miniReceiver 2.0 S

miniReceiver 2.0 M

miniReceiver 2.0 P

miniReceiver 2.0 HP



Производительность

Матрица (2 ссм)

45/108 дБ

60/119 дБ

70/124 дБ

75/130 дБ

Аккумулятор

Размер

13

13

13

13

Потребляемая мощность

1,2 мА

1,4 мА

1,3 мА

1,3 мА

Ультратонкий дизайн и естественная чистота звука

Ключевые функции



Доступно приложение Signia.



Чтобы сделать аппарат Pure 10 Nx еще более незаметным, им можно управлять удаленно с помощью приложения Signia и miniPocket

Каналы компрессии звука

7Nx 48 каналов

5Nx 32 канала

3Nx 24 канала

2Nx 16 каналов

1Nx 16 каналов

Pure 10 Nx

Ультратонкий аппарат Pure 10 Nx искусно сочетает в себе очень малый размер и естественное звучание. Имеет превосходный чистый звук и превосходное распознавание речи в условиях шума. Устройство Pure 10 Nx - без беспроводной связи – это идеальное решение для тех, кто хочет, чтобы их слуховые аппараты были простыми и незаметными.

АВР

Модель

Тип ресивера

miniReceiver 2.0S

miniReceiver 2.0 M

miniReceiver 2.0 P

miniReceiver 2.0 HP



Производительность

Матрица (2 ссм)

45/108 дБ

55/113 дБ

60/118 дБ

65/123 дБ

Аккумулятор

Размер

10

10

10

10

Потребляемая мощность

1,2 мА

1,3 мА

1,2 мА

1,2 мА

Уникальный перезаряжаемый заушный аппарат



Каналы компрессии
звука

7Nx 48 каналов

5Nx 32 канала

3Nx 24 канала

2Nx 16 каналов

1Nx 16 каналов



Motion Charge&Go Nx

Эти аппараты, доступные для всех уровней производительности, сочетают в своей надежной конструкции все преимущества Signia Nx с литиево-ионным аккумулятором с беспроводной зарядкой и неразрывным соединением через Bluetooth. Интуитивно понятное управление, выдающееся качество звука, удобные опции потоковой передачи и простые фитинги делают слуховые аппараты Motion Charge & Go Nx оптимальным решением почти для любого клиента.



Доступно приложение Signia.



Возможность перезарядки.



Поддержка Bluetooth.



StreamLine TV
Благодаря функции StreamLine TV потоковый ТВ-сигнал передается непосредственно в слуховые аппараты



Функция StreamLine Mic обеспечивает потоковую передачу звуков без использования рук с любого устройства с поддержкой Bluetooth.

Модель

Motion Charge&Go Nx



Motion Charge&Go Nx



Производительность

Матрица (2 ссм)

ThinTube 56/126 дБ

Earhook 63/134 дБ

Аккумулятор

Тип

Литий-ионный элемент питания

Литий-ионный элемент питания

Потребляемая мощность

1,4 – 2,0 мА

1,4 – 2,0 мА

Классический заушный аппарат и универсальные возможности настройки



Каналы компрессии
звука

7Nx 48 каналов

5Nx 32 канала

3Nx 24 канала

2Nx 16 каналов

1Nx 16 каналов

Motion 13 Nx

Подходит для умеренной, тяжелой или даже глубокой тугоухости. Аппарат гармонизирует голос пользователя и окружающие звуки, обеспечивая передачу наиболее естественного звучания голоса пользователя и превосходное понимание речи в условиях шума. Имеет полнофункциональное подключение через Bluetooth и дополнительную опциональную модульную Т-катушку



Доступно приложение Signia.



Стандартную крышку аккумуляторного отсека можно заменить на крышку со встроенной Т-катушкой.



Совместим с устройствами CROS для людей с односторонней тугоухостью.



StreamLine TV
Благодаря функции StreamLine TV потоковый ТВ-сигнал передается непосредственно в слуховые аппараты Motion 13 Nx .



StreamLine Mic
Функция StreamLine Mic обеспечивает потоковую передачу звуков без использования рук (телефонные звонки, музыка и т.д.) с любого устройства с поддержкой Bluetooth.

Модель

Производительность

Матрица (2 ccm)

Аккумулятор

Размер

Потребляемая мощность

Модель	Motion 13 Nx	Motion 13P Nx
Производительность		
Матрица (2 ccm)	ThinTube 56/126 дБ Earhook 63/134 дБ	ThinTube 65/129 дБ Earhook 77/135 дБ
Аккумулятор		
Размер	13	13
Потребляемая мощность	1,4 –2,0 мА	1,7 –2,0 мА

Silk Nx

Внутриканальный аппарат. Для быстрого подбора. Практически невидимый. Малый дизайн



Доступно приложение Signia.



Совместим с устройствами CROS для людей с односторонней невосстановимой тугоухостью.




Каналы компрессии звука

7Nx	48 каналов
5Nx	32 канала
3Nx	24 канала
2Nx	16 каналов
1Nx	16 каналов

Новинка! Новинка!

Silk Nx

Слуховой аппарат Silk™ Nx обеспечивает естественное звучание благодаря небольшим размерам, мгновенному подбору и исключительному качеству звука. Благодаря своим гибким силиконовым муфтам аппарат Silk Nx подбирается быстро и точно. А для пользователей с односторонней тугоухостью этот аппарат предлагает самое незаметное решение - первый в мире CROS CIC.

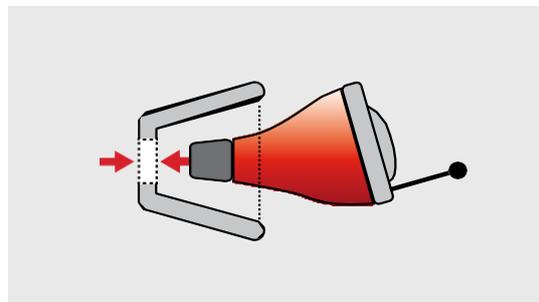

Наладка в один щелчок. Доступные в четырех размерах, муфты Click просто защелкиваются на слуховых аппаратах Silk Nx и надежно фиксируются в ухе.

Модель

Click CIC



Производительность

Матрица (2 ccm)

50/113 дБ

Аккумулятор

Размер

10

Потребляемая мощность

1,3 мА

Внутриушные аппараты всех типов с естественным звучанием



Доступно приложение Signia.



Совместим с устройствами CROS для людей с односторонней тугоухостью.



Поддержка Bluetooth.*



Каналы компрессии звука

7Nx	48 каналов
5Nx	32 канала
3Nx	24 канала

Insio Nx

Модели Insio™ Nx ITC и ITE от Signia сочетают прямое подключение через Bluetooth с лучшим в своем классе качеством звука. Специально разработанные для самых требовательных пользователей, аппараты Insio Nx предлагают более естественное звучание и при этом являются предельно незаметными. Обеспечивают кристально чистый звук и непревзойденное распознавание речи даже в очень шумной обстановке



StreamLine TV
Благодаря функции StreamLine TV потоковый ТВ-сигнал передается непосредственно в слуховые аппараты Insio Nx ITC и ITE с поддержкой Bluetooth



StreamLine Mic
Функция StreamLine Mic обеспечивает потоковую передачу звуков с любого устройства с поддержкой Bluetooth на слуховые аппараты Insio Nx ITC/ITE с поддержкой Bluetooth

ITE

Модель	ИТС	СИС	ИТС	ИТЕ
Производительность				
Матрица (2 ccm)	50/113 дБ ¹	S 50/113 дБ ¹ M 55/118 дБ ¹ P 65/124 дБ ¹	S 50/113 дБ ¹ M 55/118 дБ ¹ P 65/124 дБ ¹	M 55/118 дБ ¹ P 65/124 дБ ¹
Аккумулятор				
Размер	10	10	312	312
Потребляемая мощность	1,3 мА ¹	1,3 мА ¹	1,3 мА ¹	1,3 мА ¹

(1) макс. значения

*Доступно для слуховых аппаратов Insio Nx ITC и ITE с поддержкой Bluetooth

Мощность при малых размерах: новый аппарат типа ресивер в канале – Intuis 3 RIC 312

Ключевые функции



Доступно приложение Signia.

- TeleCare
- Удаленное управление



Приложение Signia и miniPocket


Аппарат типа Ресивер в канале - Intuis 3 RIC 312 с 12 каналами обработки звука

Благодаря своей автоматической направленности и функции подавления шума данный аппарат имеет отличное звучание и повышает разборчивость речи в шумной обстановке. Подходит для тугоухости от легкой до тяжелой степени.

Имеет маленький размер, что дает комфорт ношения. Можно управлять удаленно с помощью приложения Signia™ и miniPocket™.

Модель

Тип ресивера

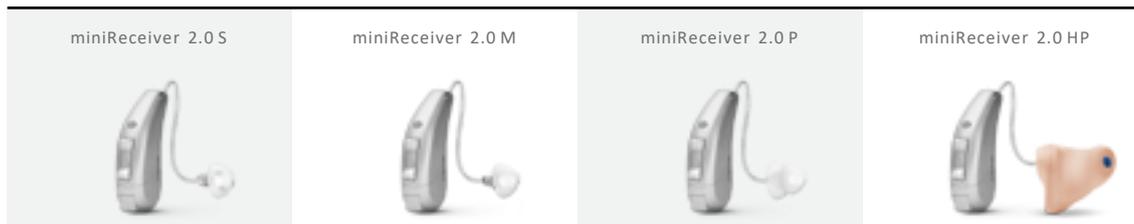

Производительность

Матрица (2 ссм)

45/108 дБ

60/119 дБ

70/124 дБ

75/130 дБ

Аккумулятор

Тип

312

312

312

312

Потребляемая мощность

0,9 мА

1,0 мА

1,0 мА

1,1 мА

Заушные аппараты INTUIS 3 –надежная и проверенная временем технология



Доступно приложение
Signia.

- TeleCare
- Удаленное управление



Заушный 12 канальный аппарат Intuis 3

Подходят для использования при тугоухости любой степени, простые в обращении Intuis 3 оснащены **автоматическими направленными микрофонами** для точной обработки звука. Благодаря своей автоматической направленности и функции подавления шума данный аппарат имеет отличное звучание и повышает разборчивость речи в шумной обстановке. Имеют дистанционное управление через приложение или пульт

Модель



Производительность

Матрица (2 ccm)

LifeTube 45/124 дБ
Earhook 55/124 дБ

LifeTube 53/125 дБ
Earhook 60/130 дБ

Earhook 70/134 дБ

Earhook 80/140 дБ

Аккумулятор

Размер

312

13

13

675

Потребляемая мощность

0,9 мА

1,0 мА

1,4 мА

2,4 мА

Внутриушные аппараты Intuis 3 с 12 каналами частотной обработки звука



Доступно приложение Signia.

- TeleCare
- Удаленное управление



Это идеальное решение для тех, кто хочет получить аппарат, который подойдет сразу же как **CLICK**, и для тех, кто предпочитает индивидуальные настройки как **CIC**.

Созданные на основе проверенной технологии, все модели предлагают четкое звучание, управляются удаленно, через Приложение или Пульт, что обеспечивает их максимальную незаметность

Модель

Intuis 3 Click CIC, Click ITC



Intuis 3 CIC, ITC, ITE



Производительность

Матрица (2 ccm)

Click CIC 50/113 дБ
Click ITC 55/116 дБ

CIC 65/124 дБ¹
ITC 65/124 дБ¹
ITE 65/124 дБ¹

Аккумулятор

Размер

Click CIC 10, Click ITC 312

CIC 10, ITC 312, ITE 13

Потребляемая мощность

1,1 мА

1,1 мА¹

(1) макс. значения

Обзор функций аппарата Intuis 3

Функции

Уровни производительности

	Essential
Улучшенное качество распознавания слухом	
Частотные каналы / управление компрессией	12/6
Количество программ	4
Направленные микрофоны ^A	автоматически ^B
Частотная компрессия	●
Комфорт при передаче звука	
Подавление обратной связи	●
Управление речью и шумом	вкл/выкл
eWindScreen (подавление шума ветра)	-
Беспроводное соединение e2e wireless 3.0	-
Беспроводное соединение e2e wireless 2.0	-
SoundSmoothing («сглаживание» резких звуков)	-
Наладка / индивидуальная настройка	
Регистрация данных	●
Менеджер акклиматизации	-
Терапия звона в ушах	-
Управление аудиостримером /слуховым аппаратом	
Приложение Signia	●
Приложение Smart Connexx и приложение Signia	-

A) Не для CIC (внутриканальный слуховой аппарат)

B) Только заушные СА

Prompt

Аппараты эконом – класса Prompt с 8 частотными каналами обработки звука

Ключевые функции



Доступно приложение Signia.

- TeleCare
- Удаленное управление



Имеет полный диапазон заушных, по типу Click и внутриканальных аппаратов.

Подходят при тугоухости любой степени.

Имеют возможность дистанционного управления для максимального удобства и незаметности через приложение или пульт

Модель

	Prompt S	Prompt P	Prompt SP
Производительность			
Матрица (2 ccm)	ThinTube 45/124 дБ Earhook 55/124 дБ	Earhook 70/134 дБ	Earhook 80/140 дБ
Аккумулятор			
Размер	312	13	675
Потребляемая мощность	0,9 мА	1,4 мА	2,4 мА

Click ITE/ITE

Модель

	Prompt Click CIC, Click ITC	Prompt CIC, ITC, ITE
Производительность		
Матрица (2 ccm)	Click CIC 50/113 дБ Click ITC 55/116 дБ	CIC 65/124 дБ ¹ ITC 65/124 дБ ¹ ITE 65/124 дБ ¹
Аккумулятор		
Размер	Click CIC 10, Click ITC 312	CIC 10, ITC 312/10, ITE 13/312
Потребляемая мощность	1,1 мА	1,1 мА ¹

(1) макс. значения

Аппарат RUN для быстрой настройки с 8 частотными каналами обработки звука

Быстро и легко настраивается без компьютера всего за пару минут с помощью удобного приложения MobileFitting на смартфоне при тугоухости от легкой до глубокой степени

Невероятно удобные, благодаря своей эргономичной форме, простые в использовании устройства Run предлагают превосходное качество передачи звука.

Ключевые функции



Доступно приложение Signia.



ЗСА

Модель	Run S	Run P	Run SP
Производительность			
Матрица (2 ccm)	ThinTube 45/124 дБ Earhook 55/124 дБ	Earhook 70/132 дБ	Earhook 79/140 дБ
Аккумулятор			
Размер	312	13	675
Потребляемая мощность	0,9 мА	1,3 мА	2,2 мА

Click ITE

Модель	Run Click CIC	Run Click ITC
Performance		
Матрица (2 ccm)	50/113 дБ	55/116 дБ
Аккумулятор		
Размер	10	312
Потребляемая мощность	1,1 мА	1,1 мА

Приложения, аксессуары и совместимость аппаратов.

Слуховой аппарат	Приложение Signia	CROS/BiCROS	Стримеры и передатчики		Удаленное управление	Зарядные станции	Индукционное зарядное устройство II
			StreamLine TV	StreamLine Mic			
							
Styletto Connect	●	-	●	●	●	● ^A	-
Styletto	●	-	-	-	●	● ^B	-
Pure 10 Nx	●	-	-	-	●	-	-
Pure 312 Nx	●	● ^C	●	●	●	-	-
Pure 13 Nx	●	● ^C	●	●	●	-	-
Pure Charge&Go Nx	●	● ^C	●	●	●	-	● ^D
Motion 13 Nx	●	● ^C	●	●	●	-	-
Motion 13P Nx	●	● ^C	●	●	●	-	-
Motion Charge&Go Nx	●	● ^C	●	●	●	-	● ^D
Silk Nx	●	● ^E	-	-	●	-	-
Insio Nx	●	● ^{G,H}	● ^F	● ^F	●	-	-
Ace primax	●	-	-	-	●	-	-
Pure primax	●	● ^{I,J}	-	-	●	-	● ^K
Cellion primax	●	● ^{J,L}	-	-	●	-	● ^D
Carat primax	●	● ^J	-	-	●	-	-
Motion SP primax	●	● ^{I,J}	-	-	●	-	-
Motion P primax	●	● ^{I,J}	-	-	●	-	-
Motion SX primax	●	● ^{I,J}	-	-	●	-	● ^K
Motion SA primax	●	● ^{I,J}	-	-	●	-	-
Motion S primax	●	-	-	-	●	-	-
Silk primax	●	● ^{I,J}	-	-	●	-	-
Insio primax	●	● ^{I,J}	-	-	●	-	-
Intuis 3	●	-	-	-	●	-	-
Intuis 3 RIC312	●	-	-	-	●	-	-
Prompt	●	-	-	-	●	-	-
Run	●	-	-	-	●	-	-

- A) Совместимо с чехлом-аккумулятором Styletto Connect
- B) Совместимо с чехлом-аккумулятором Styletto
- C) Совместимо с CROS Pure 312 Nx или CROS Pure Charge&Go Nx
- D) Совместимо с зарядным устройством Pure Charge&Go/ Motion Charge&Go/Cellion

- E) Совместимо с CROS Silk Nx
- F) Совместимо с Insio Nx ITC/ITE с поддержкой Bluetooth
- G) Insio Nx IIC и CIC совместимы с CROS Silk Nx
- H) Insio Nx ITC and ITE с поддержкой Bluetooth совместимы с CROS Pure 312 Nx

- I) Не доступно с 2px/1px
- J) Совместимо с CROS Pure
- K) Совместимо с Connexx Smart Power и Smart Charger
- L) Не доступно с 2px

Аксессуары.

Стримеры



С помощью StreamLine TV звук с телевизора может передаваться непосредственно в слуховые аппараты Signia с поддержкой Bluetooth. Пользователи могут даже настроить громкость телевизора по своему вкусу через приложение Signia.



Функция StreamLine Mic превращает устройства Signia с поддержкой Bluetooth в нечто большее, чем современный слуховой аппарат – они становятся мобильными гарнитурами и беспроводными стереонаушниками с высоким качеством звука, передаваемого в оба уха с любого устройства с поддержкой Bluetooth. Пользователи могут даже настроить громкость потоковой передачи по своему вкусу через приложение Signia.

Удаленное управление



Пульт miniPocket достаточно мал, чтобы его можно было носить как брелок, но он – идеальное решение для пользователей, которые стремятся управлять слуховым аппаратом незаметно и удобно без необходимости использования большого пульта или смартфона.

CROS/BiCROS



Для людей с невосстановимой односторонней тугоухостью. CROS от Signia получают звуковые сигналы на такой стороне и передают их в слуховой аппарат на другой стороне.

Зарядные станции



Зарядные устройства заряжают слуховые аппараты, и вам нет необходимости беспокоиться об аккумуляторах. Совместимое со слуховыми аппаратами Pure Charge&Go Nx, Motion Charge&Go Nx индукционное зарядное устройство второго поколения помогает зарядить и высушить слуховой аппарат, чтобы пользователь мог использовать его в течение всего дня.

Информация, содержащаяся в данном документе, содержит общее описание технических возможностей, которые не всегда могут присутствовать в отдельных приборах и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товарный знак в виде слова «Bluetooth» и логотип Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Sivantos осуществляется согласно лицензии. Другие торговые марки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Официальный Производитель

Продукции Siemens и Signia:

Sivantos GmbH

Генри-Дюнан-Штрассе 100

91058 Эрланген

Германия

Sivantos GmbH является лицензиатом торговой марки Siemens AG.

Нас можно найти на:

signia-hearing.com

facebook.com/signiahearing

youtube.com/signiahearing

Официальный представитель в
Казахстане
ТОО «Eurolux System»



050000, г. Алматы, ул.Желтоксан, 126,
уг.ул. Богенбай Батыра, 136

e-mail: euroluxsystema@mail.ru

www.euroluxsystem.kz

www.domsluha.kz

+7 (727) 317 42 90

+7 (727) 272 30 41

 **+7 701 729 52 22**

 **+7 707 353 85 58**

 **slyhovie_apparaty**

 **sluhovye_apparaty_kz**

 **sluhovoicentr**

